



raccomandato dal produttore delle buste stesse. Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto, al riparo da raggi solari diretti, acqua e fonti di calore.

#### 12. RIFERIMENTI NORMATIVI

La progettazione e la produzione delle componenti protesiche è eseguita in conformità alle direttive e norme armonizzate in vigore più aggiornate per quanto concerne i materiali utilizzati, i processi produttivi, le informazioni fornite e gli imballaggi.

#### 13. PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Le componenti protesiche, se rimosse dal cavo orale per un fallimento biologico o meccanico, devono essere assimilate per il loro smaltimento a rifiuti biologici, secondo le norme vigenti a livello locale.

#### 14. RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO DIFETTOSO E TERMINI DI GARANZIA

La cura ottimale del paziente e l'attenzione alle sue esigenze sono condizioni necessarie per il successo implantologico ed è necessario quindi selezionare attentamente il paziente, informarlo dei rischi inerenti e dei doveri associati al trattamento ed incoraggiarlo a cooperare con l'odontoiatra per il buon esito del trattamento stesso.

Occorre pertanto che il paziente mantenga una buona igiene, confermata durante i check-up ed appuntamenti di controllo; essa deve sempre essere assicurata e documentata come, peraltro, vanno osservate e documentate le indicazioni e le prescrizioni del medico.

Le istruzioni fornite da Sweden & Martina S.p.A. sono disponibili al momento del trattamento ed accettate dalla pratica odontoiatrica; occorre osservarle ed applicarle in tutte le fasi di cura: dall'anamnesi del paziente ai check-up post-operatori.

La garanzia copre unicamente i difetti accertati di produzione, previo invio del pezzo identificato da codice articolo e lotto, entro il periodo di validità della garanzia. Le clausole di garanzia sono disponibili sul sito [www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com).



















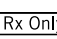







#### 15. DATA E VALIDITÀ DELLE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO

Le presenti istruzioni d'uso hanno validità e decorrenza dal mese di Maggio 2023.

Tabella 01

Dispositivo	Confezione
Pilastri provvisori, per la realizzazione di protesi provvisorie	Monouso, non sterili, completi di viti di fissaggio
Abutment e componenti per protesi avvitate, di tipo tradizionale o per tecnica P.A.D.	Monouso, non sterili, completi di viti di fissaggio
Pilastri preformati	Monouso, non sterili, completi di viti di fissaggio
Pilastri individualizzabili (incluse le basette T-Connetc per la realizzazione di pilastri individuali in zirconio con sistema CAD-CAM)	Monouso, non sterili, completi di viti di fissaggio
Viti di serraggio per pilastri, abutment e sovrastrutture (viti monconali e protesiche)	Monouso, non sterili. Venduti in dotazione ai rispettivi pilastri o individualmente, in confezione singola o multipla
Componenti per ancoraggio di overdenture rimovibili (attacchi sferici, cappette in titanio, poliammide, lega aurea, dispositivi O-rings)	Monouso, non sterili, completi di viti di fissaggio
Barre in lega preformate per e cavalieri per overdenture	Monouso, non sterili

#### LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI

	Attenzione! Vedere istruzioni per l'uso	
	Numero di lotto	
	Codice	
	Fabbricante	
	Paese di produzione	
	Codice UDI, Identificativo Unico del Dispositivo	
	Dispositivo medico	
	Consultare le istruzioni per l'uso <a href="http://www.sweden-martina.com">www.sweden-martina.com</a>	
	Marcatura di conformità CE Se applicabile: il numero di identificazione dell'organismo notificato deve seguire questo simbolo	
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un professionista	
	Non riutilizzare, prodotto monouso	
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	
	Prodotto non sterile	

  
**sweden & martina**

Sweden & Martina S.p.A.  
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia  
Tel. +39.049.9124300 - Fax + 39.049.9124290  
e-mail: [info@sweden-martina.com](mailto:info@sweden-martina.com)  
[www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com)